

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 03.11.2023 -**  
**Bundesanzeiger vom 28.11.2023**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.10.0008

Bezeichnung: C-Max U1 C1414

Art.-Nr.: 300595

Hersteller: AAT Alber Antriebstechnik GmbH

**Produktmerkmale**

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 03.11.2023 -  
Bundesanzeiger vom 28.11.2023**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.04.0002

Bezeichnung: maja sana

Art.-Nr.: -

Hersteller: tantum sana GmbH

### **Produktmerkmale**

Produktmerkmale maja sana® maja sana® ist eine elektronische Einnahmehilfe für Tabletten zur Anwendung durch Pflegebedürftige mit Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten. Mit dem Produkt werden, automatisiert nach einem individuellen Medikationsplan von Apotheken verblisterte Einzeldosen von Medikamenten ausgegeben und dabei optisch und akustisch an den korrekten Zeitpunkt der Einnahme erinnert. Die individuellen Blister müssen manuell geöffnet werden. Auf Wunsch können bei ausbleibender Entnahme der Medikamente Kontaktpersonen mittels SMS informiert werden. Für den Betrieb des Produktes ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Lieferumfang: • 1 maja sana® Tablettenspender mit integriertem Netzteil • 2 Schlüssel (zum sicheren Verschließen des Medikamentenmagazins) • 2 Einschaltwerkzeug (SIM-Nadel) • 1 Bedienungsanleitung • 1 Kurzanleitung für Anwender • 1 Edelstahltablett • 1 Testblisterrolle (Nicht zum Verzehr geeignet) • Persönliche Log-In Daten (QR-Code, Email und Passwort)

Technische Daten: Gewicht: 3,6 kg (5,3 kg inklusive Verpackung) Größe: 25 x 25 x 42 cm (HxBxT)

Netzteil: Input 100-249V - 50/60Hz 1.3A Max Output: 12V / 3A / 36W Lagerung

Temperaturbereich -10°C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht

kondensierend Betrieb: Temperaturbereich +15°C bis +35 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %

relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend Kapazität: max. Blisterrollen-Durchmesser 14 cm

das entspricht ca. 60 Blistertüten IP-Schutzart: IP20 Touch-Display: 20,3 cm (8") IPS HD (1280 x

800) LCD 350 cd/m<sup>2</sup> 10-Punkt-Multitouch Tablett: 1,6 x 22,5 x 11,5 cm (HxBxT) Gewicht 90g

Verwendungszweck/Indikationen: Zur Anwendung durch Pflegebedürftige mit Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten. Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen gemäß

Herstellerangaben: maja sana® nutzt akustische und optische Signale, um an die Einnahme der Medikamente zu erinnern, optische Hinweise am Bildschirm, um Bedienhinweise zu geben und

## Produktmerkmale

akustische (sprachliche) Hinweise bei der Bedienung. maja sana® ist deshalb nicht für Menschen geeignet, deren gesundheitliche Einschränkungen dazu führen, dass sie die akustisch/visuelle Signalgebung nicht erkennen und/oder angemessen in Reaktion und Aktion umsetzen können oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind maja sana® zu bedienen. Dies trifft zum Beispiel bei den nachfolgenden Sachverhalten zu: Bei stark eingeschränkter Sehfähigkeit ist maja sana® nicht sicher benutzbar. Bei stark eingeschränkter Hörfähigkeit ist der Benutzer allein auf die optischen Signale angewiesen. maja sana® stellt die jeweils fälligen Medikamentenblister zur Verfügung und schneidet zur leichteren Öffnung den Blister seitlich an. Dennoch ist eine gewisse Kraft und Geschicklichkeit der Hände notwendig den Blister zu öffnen. maja sana® ist deshalb in der Regel nicht für Nutzer mit stark eingeschränkter Handfunktion geeignet. Stark eingeschränkte Handfunktion bedeutet hier insbesondere eine schwere Einschränkung der Grob- und Feinmotorik der oberen Extremitäten. Um die Angaben auf dem Bildschirm zu lesen, ist maja sana® nicht für Anwender mit stark eingeschränkter Sehfähigkeit geeignet. • Stark eingeschränkte Sehfähigkeit bedeutet hier Visus kleiner als 30% • Ebenso ist maja sana® nicht geeignet, wenn die kognitiven Fähigkeiten stark eingeschränkt sind. Stark eingeschränkte kognitive Fähigkeiten bedeuten hier zum Beispiel: • Fortgeschrittene dementielle Entwicklung • Schwere andere kognitive und/oder psychische oder psychiatrische Einschränkungen